

## **INSTRUMENTOS AUDITIVOS RESOUND VEA™ MINI, ESTÁNDAR Y ELÉCTRICO RETROAURICULARES (BTE)**

*Este suplemento detalla los aspectos de uso práctico de sus recién adquiridos instrumentos auditivos. Consulte la guía del usuario de ReSound Vea que se incluye con sus instrumentos auditivos para obtener información importante, incluyendo advertencias y precauciones.*

VE60,70,80

### **Información del modelo:**

La designación del modelo de su instrumento auditivo es \_\_\_\_\_.

### **Información sobre la batería:**

Su instrumento auditivo utiliza una batería de tamaño \_\_\_\_\_.

### **Sus entornos de programa:**

Programa Descripción

Programa	Descripción
1	
2	
3	
4	

*Distribuido por:*

#### **GN ReSound Norteamérica**

8001 Bloomington Freeway, Bloomington, MN 55420  
1-888-735-4327

#### **GN ReSound Canadá**

303 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M4  
1-888-737-6863

gnresound.com  
consumerhelp@gnresound.com

## **CONTENIDO**

*página*

### **PARA COMENZAR**

Ilustración del instrumento auditivo . . . . .	2
Cómo utilizar el instrumento auditivo . . . . .	4
Función de encendido/apagado	
SmartStart™	
Cómo cambiar la batería	
Cómo insertar el instrumento auditivo	
— con tubo delgado y domo . . . . .	5
— con molde auricular y tubo estándar . . . . .	7
Cómo retirar el instrumento auditivo . . . . .	8

### **CONTROLES Y FUNCIONES**




Control del volumen	
Selector de programa . . . . .	9
Sus entornos de programa . . . . .	10
Uso del teléfono	
Programa telebobina . . . . .	11
Programa de teléfono acústico	
PhoneNow™	
Teléfono celular . . . . .	13
Escuchar radio o televisión	
Uso de sistemas de audición asistida (telebucle) . . . . .	14
Entrada directa de audio	
Indicador de bajo nivel de batería . . . . .	15

### **MANTENIMIENTO**

Manejo correcto . . . . .	16
Mantenimiento diario	
Limpieza del molde auricular y el tubo . . . . .	17
Limpieza del tubo delgado y el domo . . . . .	18
Cambio del domo . . . . .	19
Guía de resolución de problemas . . . . .	22

## ILUSTRACIÓN DEL INSTRUMENTO AUDITIVO


1. Selector de programa
2. Puerta de la batería e interruptor de encendido/apagado
3. Salida de sonido
4. Entrada de sonido del micrófono frontal
5. Entrada de sonido del micrófono trasero
6. Control del volumen
7. Contacto de entrada de audio directo (DAI)
8. Indicador de izquierda/derecha (*izquierda=azul, derecha=rojo*)
9. Mecanismo de bloqueo de la puerta de la batería (*opcional*)

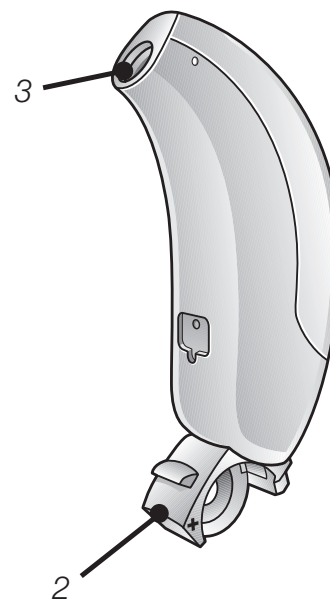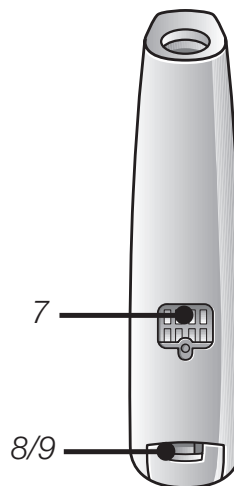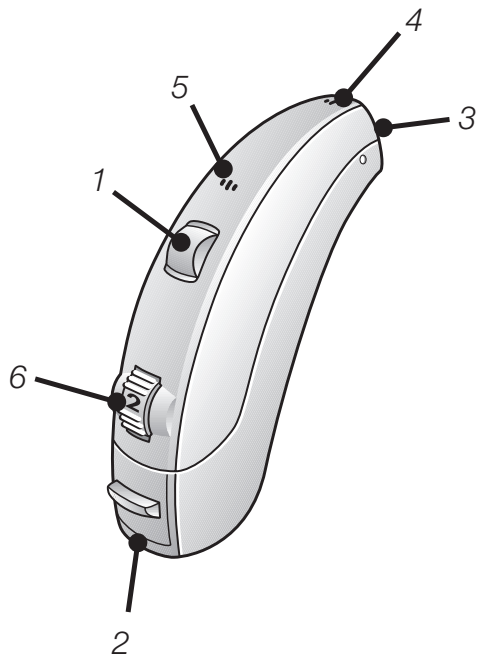

## CÓMO USAR EL INSTRUMENTO AUDITIVO

### **Función de encendido/apagado**

Su instrumento auditivo ReSound Vea está equipado con un interruptor de encendido/apagado integrado en la puerta de la batería.

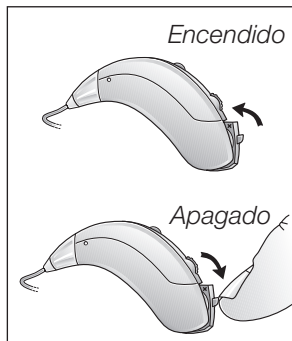

- Cuando la puerta de la batería está totalmente cerrada, el instrumento se enciende y el Programa 1 se activará.
- Para apagar el instrumento, abra la puerta de la batería.

**i** SUGERENCIA: Cuando no esté usando el instrumento, recuerde apagarlo para reducir el consumo de batería.

Por lo general, las personas prefieren encender el instrumento auditivo después de colocarlo detrás de la oreja y de insertar el domo o el molde auricular dentro del oído. Si desea encender el instrumento antes de colocarlo en la oreja, su profesional de la salud especializado en audición puede activar la función SmartStart™.


### **SmartStart™**

SmartStart™ le permite insertar el instrumento dentro del oído sin molestos sonidos de chillido. A partir de cuando se cierra la puerta de la batería, demora la activación del instrumento auditivo durante diez segundos. Durante estos diez segundos, escuchará una serie de pitidos simples.

### **Cómo cambiar la batería**

Las baterías del instrumento auditivo son bastante pequeñas, lo que puede ocasionar dificultad para ver las marcas de la batería y de la puerta de la batería. Una lupa y buena iluminación pueden ayudar.

Abra el compartimiento de la batería jalando hacia abajo la puerta de la batería con su uña. Quite la batería usada e inserte una nueva con el lado "+" hacia la marca "+" de la puerta de la batería.

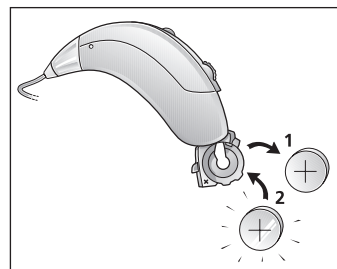

Debe embonar como la pieza de un rompecabezas. La puerta de la batería debe cerrarse muy fácilmente. Nunca use fuerza para cerrar la puerta, ya que hacerlo puede dañar su instrumento auditivo.


Siempre utilice el tamaño de batería correcto. (Debe indicarse en su guía del usuario). Tenga en cuenta que si la batería es débil, el desempeño del instrumento auditivo se verá disminuido.

**i** SUGERENCIA: Quitar la batería cuando no esté usando el instrumento reducirá el consumo de batería y extenderá la vida útil de la batería.

## CÓMO INSERTAR EL INSTRUMENTO AUDITIVO – CON TUBO DELGADO Y DOMO


Para insertar el instrumento auditivo en su oído:

1. Cuelgue el instrumento sobre la parte superior de la oreja.

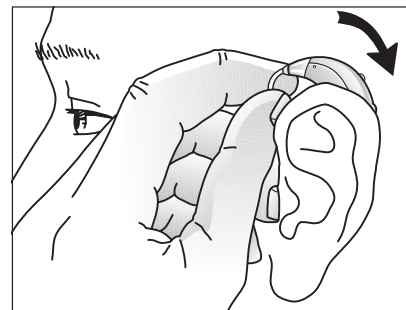


2. Sostenga el tubo delgado donde se dobla y empuje el domo dentro del canal auditivo

(hacia su nariz). El domo debe insertarse lo suficiente dentro del oído para que el tubo delgado quede al ras contra la cabeza. Cuando el domo se coloca correctamente, usted no debe ver que el tubo delgado sobresalga al mirarse directamente al espejo.

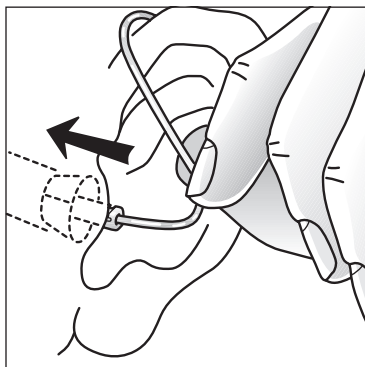

Si utiliza un seguro para deportes, asegúrese de que esté correctamente colocado en la concha de la oreja.


Experimentando puede encontrar un método que sea más fácil para usted. Cuando está bien insertado, el instrumento debe quedar cómodamente dentro del oído y detrás de la oreja. Si el instrumento auditivo le irrita el oído de alguna manera y esto le impide usar el instrumento, comuníquese con su profesional de la salud especializado en audición.

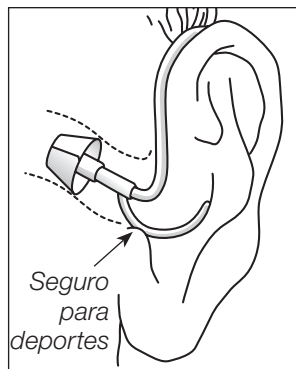


## CÓMO INSERTAR EL INSTRUMENTO AUDITIVO –CON MOLDE AURICULAR Y TUBO ESTÁNDAR


Para insertar el instrumento auditivo en su oído:

1. Tome el molde auricular entre el pulgar y el dedo índice y coloque la punta en su canal auditivo. Ahora deslice el molde auricular totalmente dentro del oído con un suave movimiento giratorio.

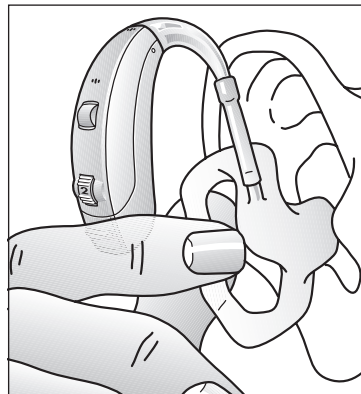


2. Mueva la parte superior del molde auricular suavemente hacia atrás y hacia delante hasta que encaje detrás del pliegue de piel que está sobre su canal auditivo. La inserción puede facilitarse si jala suavemente su oreja hacia atrás con la otra mano.

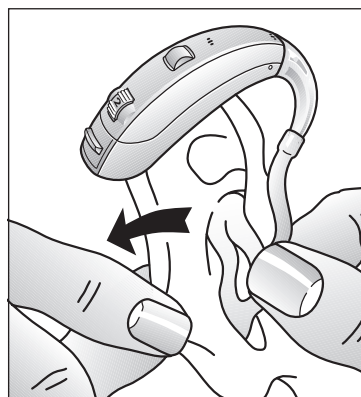

 **NOTA:** Nunca intente modificar la forma del instrumento auditivo, el molde auricular ni del tubo usted mismo.

3. Coloque el instrumento auditivo detrás de su oreja.

4. Mueva el molde auricular hacia arriba y hacia abajo y presione suavemente para asegurarse de que esté correctamente posicionado dentro del oído. Abrir y cerrar la boca puede facilitar la inserción. Usted sentirá cuando el molde auricular esté correctamente colocado.

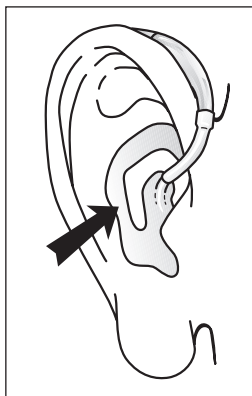

Experimentando puede encontrar un método que sea más fácil para usted. Cuando está bien insertado, el instrumento debe quedar cómodamente dentro del oído y detrás de la oreja. Si el instrumento auditivo le irrita el oído de alguna manera y esto le impide usar el instrumento, comuníquese con su profesional de la salud especializado en audición.

 **NOTA:** Nunca intente modificar la forma del instrumento auditivo, el molde auricular ni del tubo usted mismo.

## CÓMO EXTRAER EL INSTRUMENTO AUDITIVO

Para retirar el instrumento auditivo de su oído, con el pulgar y el dedo índice, simplemente jale el molde auricular o el tubo delgado para sacarlos del oído. Consulte a su profesional de la salud especializado en audición si tiene dificultades para extraer su instrumento auditivo.

## CONTROL DEL VOLUMEN


Los instrumentos auditivos BTE que tienen control de volumen le permiten ajustar el volumen del instrumento auditivo según sus preferencias. La rueda de volumen tiene números del 1 al 4, que es el máximo nivel de volumen.

1. Para aumentar el volumen con el instrumento dentro del oído, gire la rueda de control de volumen hacia arriba.

2. Para disminuir el volumen, gire la rueda hacia abajo.


## SELECTOR DE PROGRAMA

La cantidad de programas de audición de su instrumento auditivo será determinada por su profesional de la salud especiali-

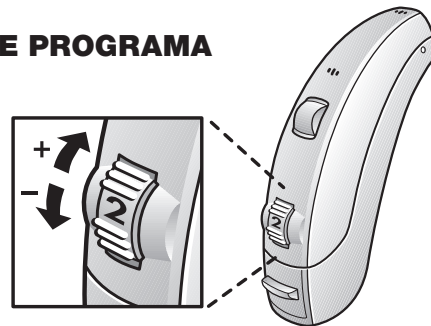

zado en audición según sus necesidades individuales. En los instrumentos con múltiples programas de audición, puede cambiar de un programa a otro presionando brevemente el selector de programa.

Con cada presión del selector de programa, escuchará uno o más pitidos. La cantidad de pitidos corresponde al programa que seleccionó. Por ejemplo, escuchará un pitido para el Programa 1 y dos pitidos para el Programa 2.

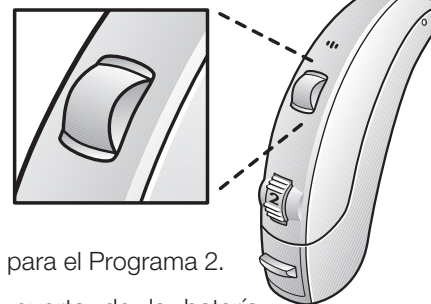

Abrir y cerrar la puerta de la batería siempre restablecerá su instrumento auditivo al Programa 1.

### **Sus entornos de programa:**

*(Debe llenarlos junto con su profesional de la salud espe-*


cializado en audición)

## Programa Descripción

1	
2	
3	
4	
<b>USO DEL TELÉFONO</b>	

El uso del teléfono puede requerir cierta práctica para maximizar su desempeño. Experimentar con las distintas funciones del instrumento auditivo y el posicionamiento correcto del teléfono le ayudará a optimizar la señal que escucha en el teléfono.

Todos los instrumentos auditivos ReSound están equipados con un sistema de supresión de retroalimentación digital adaptativo que está diseñado para reducir los silbidos (retroalimentación) cuando un objeto, como un teléfono, se coloca cerca del instrumento auditivo. Al utilizar el teléfono, recomendamos que lo sostenga cerca del micrófono del instrumento auditivo sin apoyarlo directamente en el mismo. Si ocurre retroalimentación, sostenga el teléfono sin moverlo, ya que el sistema de supresión de retroalimentación digital se adapta para suprimir el silbido.

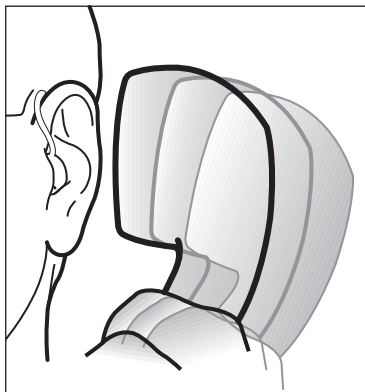

Hay funciones adicionales que pueden facilitar el uso del teléfono, las cuales se describen a continuación. Consulte a su profesional de la salud especializado en audición para identificar cuáles opciones están disponibles en su instrumento auditivo y son las más adecuadas para sus necesidades.

### **Programa telebobina**

Su instrumento auditivo ReSound está equipado con una telebobina que capta las señales magnéticas de un teléfono compatible con aparatos auditivos. Puede acceder al programa telebobina usando el selector de programa. Al hacerlo, el instrumento auditivo detectará los sonidos que provienen del teléfono sin generar retroalimentación.

Al utilizar el programa telebobina, el receptor del teléfono se debe sostener como se muestra en el diagrama bajo "Uso del teléfono". Puede ser necesario reposicionar el teléfono ligeramente para encontrar la mejor recepción.

### **Programa de teléfono acústico**

Un programa de teléfono acústico es un programa de audición que está especialmente diseñado para utilizarse con el teléfono. Funciona en combinación con el sistema de supresión de retroalimentación digital y no utiliza una telebobina. Usted puede acceder a él utilizando el selector de programa para elegir el programa de teléfono acústico.

Una vez que se seleccione el programa, sostenga el teléfono cerca del micrófono del instrumento auditivo. Puede ser necesario reposicionar el teléfono ligeramente para encontrar la mejor recepción.

### **PhoneNow™**

La función PhoneNow™ permite que su instrumento auditivo cambie automáticamente a su programa de teléfono al levantar un receptor de teléfono al oído. Cuando el receptor de teléfono se retira del oído, el instrumento auditivo automáticamente vuelve al programa de audición anterior. En la


mayoría de los casos, es necesario montar un imán en el teléfono a fin de mejorar la capacidad del instrumento auditivo de detectar la señal de teléfono.

#### *Colocación del imán PhoneNow*

A fin de colocar correctamente el imán PhoneNow:

1. Limpie muy bien el receptor del teléfono.
2. Sostenga el teléfono como lo haría típicamente al hacer una llamada.
3. Coloque el imán justo debajo del puerto de sonido del receptor del teléfono. Si es necesario, mueva el imán a otra posición para mejorar la facilidad de uso y la comodidad al hablar.

**i** NOTA: Utilice únicamente un agente de limpieza recomendado para limpiar el teléfono antes de

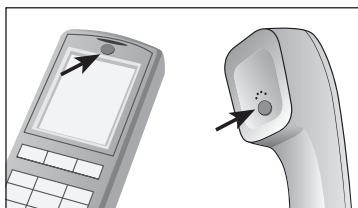

colocarle el imán.

#### *Uso de PhoneNow*

PhoneNow permite que las personas que utilizan instrumentos auditivos usen los teléfonos de manera normal. El instrumento auditivo generará una melodía breve de pitidos para indicar que la función PhoneNow ha cambiado automáticamente el instrumento auditivo a su programa de teléfono. Inicialmente, es posible que deba mover el receptor del teléfono ligeramente para encontrar la mejor posición para la activación confiable de PhoneNow y para escuchar bien en el teléfono.

NOTA: Precauciones de PhoneNow:

**!** • Mantenga los imanes fuera del alcance de las mascotas, los niños y las personas con discapacidades mentales. Si se traga un imán, busque asesoría de un profesional de la medicina.

- El imán se utiliza para fortalecer el campo magnético de un receptor de teléfono y puede afectar la funcionalidad de algunos dispositivos médicos o sistemas electrónicos. Mantenga siempre el imán o un teléfono equipado con el imán a una distancia mínima de 30 cm (12") de los marcapasos, las tarjetas de crédito y otros dispositivos sensibles al magnetismo.
- Una alta distorsión durante el marcado o las llamadas telefónicas puede significar que el imán no está en la posición óptima en relación con el receptor de teléfono. Para evitar este problema, mueva el imán a otro lugar del receptor de teléfono.
- Utilice únicamente imanes suministrados por GN ReSound.

#### **Teléfono celular**

Si utiliza un teléfono celular, puede experimentar un zumbido o chasquidos. Esto es ocasionado por una señal potente generada por el teléfono celular. Consulte a su profesional de la salud especializado en audición para ver si existen opciones para mejorar la calidad del sonido.

## **ESCUCHAR RADIO O TELEVISIÓN**

Al escuchar radio o televisión, empiece escuchando a los presentadores de noticias, ya que ellos por lo general hablan claramente. Luego pruebe otros programas.

Si le parece difícil escuchar radio o televisión, su profesional de la salud especializado en audición podrá asesorarlo acerca de los accesorios disponibles para mejorar sus capacidades de audición para radio y televisión.

## **USO DE SISTEMAS DE AUDICIÓN**



## ASISTIDA (TELEBUCLE)

Muchos lugares públicos como escuelas, teatros y templos cuentan con sistemas de aducción asistida (telebucle). Para aprovechar un sistema telebucle, seleccione el programa telebobina. Cuando el programa telebobina se ha seleccionado, podrá escuchar una señal de sonido clara por el sistema telebucle. Si no puede escuchar la señal del telebucle mientras está en el programa telebobina, verifique para determinar que el sistema esté funcionando correctamente.

Si una escuela, teatro o templo no cuenta con un sistema telebucle, trate de sentarse tan cerca de la bocina como sea posible y utilice uno de los programas de micrófono.

## ENTRADA DIRECTA DE AUDIO

El uso de la entrada directa de audio (DAI) que permite una conexión directa del instrumento auditivo con objetos tales como televisores, radios y micrófonos remotos, puede aumentar la comprensión del habla para algunas personas en situaciones ruidosas o cuando la persona que está hablando está lejos. La fuente de sonido se transmite al instrumento auditivo mediante un cable que se conecta a un adaptador de audio que se coloca en la parte inferior del instrumento auditivo. Alternativamente, la señal puede transmitirse de forma inalámbrica a un receptor FM que se acopla al adaptador de audio.

Cuando el adaptador de audio está correctamente conectado, el instrumento auditivo automáticamente cambia al programa DAI.


### *Conexión de un adaptador de audio*

1. Alinee la punta del adaptador de audio con la ranura que se encuentra justo sobre el compartimiento de la batería y debajo del número de modelo. El adaptador debe sostenerse a un ángulo de 45°.
2. Una vez en su lugar, mueva el adaptador en la dirección


del compartimiento de la batería.

3. Conecte suavemente el adaptador de audio al instrumento auditivo.

### *Desconexión de un adaptador de audio*

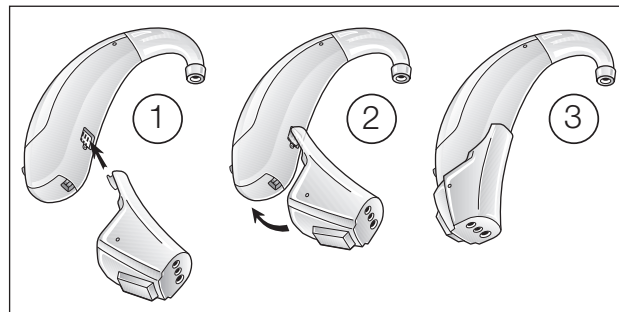

4. Presione y sostenga el botón que está al frente del adaptador de audio.
5. Haga girar el adaptador con un movimiento en arco, alejándolo del instrumento auditivo y suavemente retire el adaptador de audio.

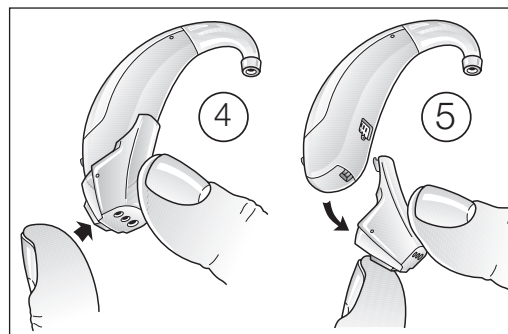

## INDICADOR DE BAJO NIVEL DE BATERÍA

Su profesional de la salud especializado en audición puede activar un indicador de bajo nivel de batería en su instrumento auditivo. El instrumento auditivo disminuirá

la amplificación y reproducirá una melodía de pitidos si el voltaje de la batería cae por debajo de un nivel crítico. Esta señal se repetirá cada cinco minutos hasta que el instrumento auditivo se apague automáticamente.

El tiempo del indicador de bajo nivel de batería puede variar ligeramente, dependiendo del tipo de batería utilizado. Se recomienda que tenga baterías de repuesto a la mano.

## MANEJO CORRECTO

Su instrumento auditivo está protegido por una capa de material protector de nanorecubrimiento hidrofóbico. Sin embargo, siga estas instrucciones para prolongar aún más la durabilidad de su instrumento auditivo.

**i** SUGERENCIA: Para evitar la necesidad de reparaciones no deseadas:


- Nunca sumerja el instrumento en agua o en otros líquidos, ya que esto puede ocasionar daño permanente a los circuitos.
- Proteja su instrumento auditivo del maltrato y evite dejarlo caer sobre superficies o pisos duros.
- No deje el instrumento cerca de fuentes directas de calor o en la luz del sol, ya que el calor excesivo puede dañar el instrumento o deformar la cubierta.
- Para evitar daños, los instrumentos auditivos deben ser extraídos antes de la aplicación de aerosol para el cabello, maquillaje u otros cosméticos.

## MANTENIMIENTO DIARIO

Mantenga su instrumento auditivo limpio y seco. Limpie la cubierta con un paño suave o con pañuelo desechable antes de utilizarlo para eliminar los aceites de la piel o la humedad.

## Limpieza del molde auricular y el tubo

El molde auricular dirige el sonido amplificado del instru-

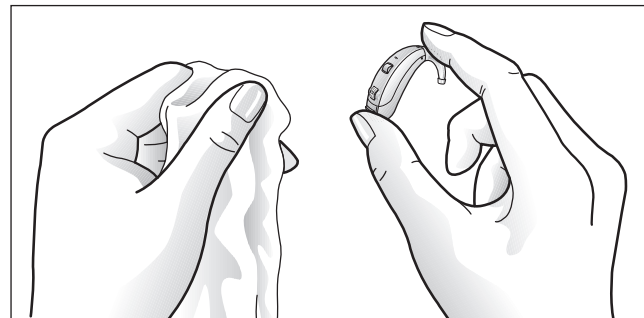


mento auditivo al oído. Es importante que el molde auricular se ajuste correctamente dentro de su oreja. Si el molde auricular le irrita la oreja de alguna manera y esto le impide usar el instrumento auditivo, comuníquese con su profesional de la salud especializado en audición para que modifique el molde.



**NOTA:** Nunca debe intentar modificar la forma del molde auricular usted mismo.

El molde auricular debe limpiarse periódicamente. Retire el molde auricular y el tubo de silicona del instrumento auditivo antes de limpiarlo. Lave el molde auricular en agua templada con detergente suave. Si hay cerilla alojada en el canal auditivo o en el molde auricular, puede utilizarse fácilmente el gancho de limpieza o una jeringa con agua

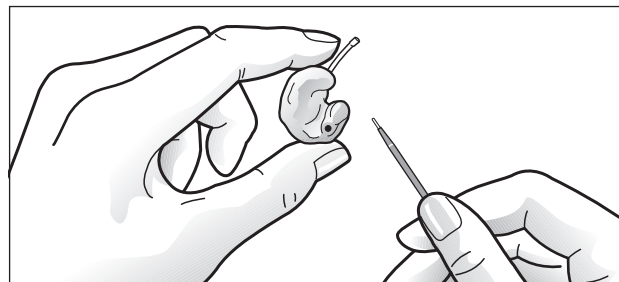

templada para sacar la cerilla.

**!** NOTA: Asegúrese de secar por completo del molde auricular y su tubo antes de volver a conectarlo al instrumento auditivo. Sople suavemente a través del tubo para eliminar la humedad atrapada en su interior.


El tubo de silicona que conecta el molde auricular con el instrumento auditivo debe cambiarse si se pone rígido o quebradizo. Contacte a su profesional de la salud especializado en audición para cambiar el tubo cuando se necesite.

### **Limpeza del tubo delgado y el domo**

El tubo delgado dirige el sonido amplificado del instrumento auditivo al oído. Es importante que el tubo delgado y el domo se ajusten correctamente al oído. Si el tubo delgado o el domo le irritan la oreja de alguna manera y esto le impide usar el instrumento auditivo, comuníquese con su profesional de la salud especializado en audición.

**!** NOTA: Nunca debe intentar modificar la forma del tubo delgado usted mismo.

El tubo delgado y el domo deben limpiarse de forma periódica. Retire el tubo delgado del instrumento antes de limpiarlo desenroscándolo. Utilice un paño húmedo para limpiar el tubo delgado y el domo en la parte exterior y utilice la varilla negra de limpieza para empujar cualquier suciedad y sacarla del tubo delgado. La varilla de limpieza debe insertarse en la parte en que el tubo se une al instrumento y empujarse totalmente por el tubo delgado hasta que salga por el domo.

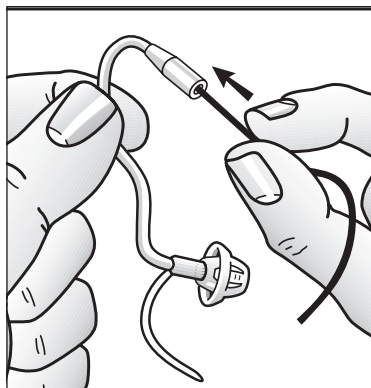

**!** NOTA: No sumerja ni enjuague el tubo delgado y el domo con agua, ya que existe el riesgo de que una gota de agua pueda quedarse dentro del tubo delgado. Si esto ocurre, impedirá que el sonido atraviese el tubo delgado y puede ser dañino para la electrónica del instrumento.

El tubo delgado debe cambiarse cada 3 a 6 meses o antes si se pone rígido o quebradizo.


### **CAMBIO DEL DOMO**

Recomendamos que su profesional de la salud especializado en audición le cambie los domos cada 3 a 6 meses o antes si el domo se pone rígido o quebradizo. Si su profesional de la salud especializado en audición le indica que cambie los domos usted mismo, asegúrese de que estén firmemente sujetos al tubo delgado antes de insertarlos en su oído.

**!** NOTA: Si no se cambian los domos según las instrucciones que aparecen a continuación, el resultado podría ser una lesión.

#### *Montaje de un domo abierto/domo tipo tulipán*

Monte el domo tipo en el tubo delgado empujándolo sobre las ranuras del tubo delgado como se demuestra en la ilustración

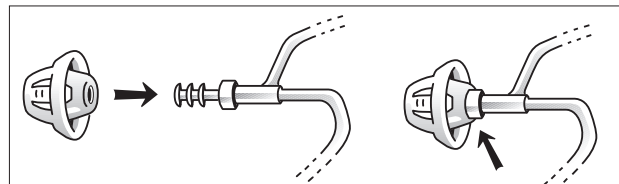


a continuación. Asegúrese de que esté firmemente sujeto.

#### *Preparación de un domo tipo tulipán para inserción*

El domo tipo tulipán consiste en dos “pétalos” y es importante que el “pétalo” más grande sea el que quede hacia afuera (figura 3).

Esto puede hacerse fácilmente presionando los “pétalos” alejándolos del tubo de sonido con su dedo (figura 1). Esto hará que el “pétalo” más grande se doble hacia delante. Luego empújelo hacia atrás y se colocará sobre el “pétalo” más pequeño (figura 2). Ahora el domo tipo tulipán está listo para montarse en el tubo delgado. Monte el domo tipo tulipán en el tubo delgado empujándolo sobre las ranuras del tubo delgado. Asegúrese de que quede firmemente sujetado (figura 3).

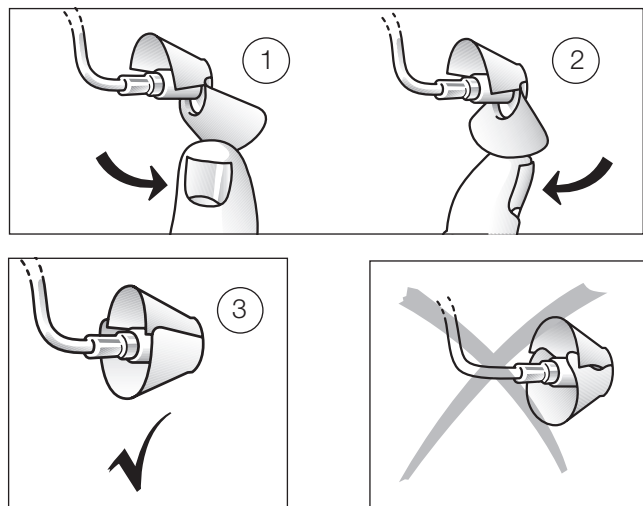

**IMPORTANTE:** Consulte en la documentación proporcionada con su instrumento auditivo importantes precauciones y advertencias.

**NOTAS:**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No está encendido</li> <li>• Batería baja/descargada</li> <li>• Batería mal insertada</li> <li>• Molde auricular, tubo o domo obstruido</li> <li>• Entrada o salida de sonido obstruida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda cerrando la puerta de la batería</li> <li>• Cambie la batería</li> <li>• Inserte correctamente la batería</li> <li>• Limpie el molde auricular, tubo o domo</li> <li>• Utilice las herramientas proporcionadas para limpiar la entrada o salida de sonido y/o consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> </ul>
Volumen bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Molde auricular o domo suelto</li> <li>• Molde auricular o domo obstruido</li> <li>• Molde auricular o domo mal insertado</li> <li>• Cambio en la audición</li> <li>• Volumen demasiado bajo</li> <li>• Cerilla excesiva</li> <li>• Entrada o salida de sonido obstruida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuelva a insertarlo cuidadosamente en su oído</li> <li>• Limpie el molde auricular, tubo o domo</li> <li>• Extraiga y vuelva a insertar</li> <li>• Consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> <li>• Ajuste el control de volumen y/o consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> <li>• Consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> <li>• Utilice las herramientas proporcionadas para limpiar la entrada o salida de sonido y/o consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> </ul>
Silbidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Molde auricular o domo mal insertado</li> <li>• Molde auricular que no ajusta bien en el oído</li> <li>• Conexión de tubo suelta</li> <li>• Acumulación de cerilla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extraiga y vuelva a insertar</li> <li>• Consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> <li>• Consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> <li>• Consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> </ul>
Distorsionado o no claro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batería baja</li> <li>• Molde auricular o domo suelto</li> <li>• Instrumento auditivo dañado</li> <li>• Los parámetros del instrumento auditivo no son óptimos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambie la batería</li> <li>• Consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> <li>• Consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> <li>• Consulte a su profesional de la salud especializado en audición</li> </ul>

Si hay otros problemas que no se mencionan en esta guía, comuníquese con su profesional de la salud especializado en audición.

